



## MASCARETES QUIRÚRGICOS

### PRODUCTE SANITARI UNE-EN 14683

Redueixen l'emissió d'agents infecciosos des del nas i la boca d'un portador asimptomàtic o d'un pacient amb símptomes clínics

**Protecció de dins cap a fora**



## COL·LOCACIÓ

1. Renta't les mans abans de col·locar-te la mascareta quirúrgica
2. Segueix les recomanacions del fabricant



La part de color ha de mantenir-se com a cara externa



En el cas de mascaretes amb cordons i no amb gomes: assegurar els cordons per darrera del cap, un a l'alçada del clatell i l'altra a la meitat posterior del cap



Ajusta la mascareta quirúrgica ben enganxada a la cara, cobrint nas i boca

## RETIRADA



La retirada es realitza des de les cintes o les gomes, mai es tocarà la part externa de la mascareta.

## RECORDA

Dipositar-la en el contenidor adequat després del seu ús i higienitzar-te les mans

